



Dexicor

Dekspantenol 5% Żel do oczu 10 g tuba

DEXICOR to wyrób medyczny pomagający utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia oraz zabezpieczający powierzchnię oka poprzez tworzenie filmu ochronnego.

CZYM JEST DEXICOR I CO ZAWIERA?

Tuba DEXICOR zawiera 10 g sterylnego żelu do oczu.

1 g DEXICOR zawiera dekspantenol 50 mg, karbomer, wersenian disodowy, wodorotlenek sodu, wodę i cetrymid (konserwant).

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ DEXICOR?

DEXICOR pomaga utrzymać fizjologiczną równowagę powierzchni oka, zapewniając odpowiedni poziom nawodnienia i ochronę nabłonka rogówki.

Preparat zapewnia ulgę dla oka w przypadku suchości i uczucia ciała obcego, piekących i zmęczonych oczu wynikających z długotrwałego korzystania z komputera, oglądania telewizji oraz ekspozycji na ogrzewanie czy klimatyzację.

Właściwości fizyczne karbomeru pozwalają żelowi DEXICOR na wiązanie cząsteczek wody, tworząc na powierzchni oka nawilżającą powłokę, która pozwala na wydłużenie średniego czasu rozpadu filmu łzowego u pacjentów cierpiących na zespół suchego oka oraz inne schorzenia, których objawem jest suche oko.

JAK STOSOWAĆ DEXICOR?

1. Dokładnie umyj i wysusz ręce przed użyciem produktu.
2. Odchyl głowę.
3. Delikatnie odciągnij dolną powiekę do momentu utworzenia się małej kieszonki pomiędzy powieką a okiem.
4. Trzymaj tubkę nad okiem.
5. Naciśnij delikatnie tubkę, aplikując po jednej kropli do każdego oka.
6. Dokładnie zakręć nakrętkę po użyciu.

OSTRZEŻENIA:

- » Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na którykolwiek ze składników produktu.
- » W przypadku podrażnienia oka należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- » Nie stosować w przypadku uszkodzenia tuby lub kartonika.
- » Nie połykać.
- » Przechowywać poza zasięgiem i w miejscu niewidocznym dla dzieci.
- » Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w suchym miejscu w temperaturze od 9°C do 25°C.
- » Nie dotykać oka i palców końcówką tuby.
- » Po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 8 tygodni.
- » Nie stosować produktu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
- » DEXICOR powinien być stosowany przez jedną osobę.
- » Po aplikacji może nastąpić chwilowe pogorszenie widzenia związane z lepkością produktu. Należy zachować ostrożność do momentu powrócenia prawidłowej ostrości widzenia.
- » Przed aplikacją należy zdjąć szkła kontaktowe, a następnie odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem. Zastosowanie żelu DEXICOR z założonymi szklami kontaktowymi może spowodować zabrudzenie ich powierzchni.
- » W przypadku jednoczesnego stosowania innych produktów do oczu należy odczekać 15 minut pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.
- » Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
- » Produkt nie jest przewidziany do stosowania dłużej niż 30 dni; jeżeli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.



Dystrybutor:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn

Stan informacji: 10.2021

FBDEX02500



NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Mediolan, Włochy