

GENIVAG

Żel dopochwowy z kwasem hialuronowym

Wyrób medyczny wskazany w leczeniu i zapobieganiu suchości pochwy

Wskazania:

Wyrób medyczny Genivag wskazany jest w celu zapobiegania i leczenia suchości pochwy oraz w przebiegu stanów zapalnych i infekcji pochwy. Kwas hialuronowy to dobrze rozpuszczalny niesiarczanowany glikozaminoglikan o bardzo dużej masie cząsteczkowej. Dzięki swoim właściwościom mukomimetycznym, lepkosprężystym i nawilżającym zapewnia odpowiednie nawilżenie błony śluzowej pochwy. Genivag pełni funkcję bariery, przyczyniając się do naprawy zmian spowodowanych suchością pochwy i ułatwiając powrót do stanu fizjologicznego błony śluzowej.

Instrukcja użycia:

1. Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyj ręce oraz obszar objęty leczeniem, pozostawiając go do całkowitego wyschnięcia.
 2. Zdejmij nasadkę z kaniuli przed użyciem.
 3. Wprowadź aplikator do pochwy na maksymalną możliwą głębokość (wskazane jest ułożenie się w pozycji leżącej) i zaaplikuj zawartość do pochwy.
 4. Wyrzuć aplikator po użyciu.
- Aplikację powtarzaj raz dziennie przez 7 dni.

Ostrzeżenia:

- Produkt składa się z 7 jednorazowych aplikatorów do jednokrotnego użycia dopochwowego;
- Nie aplikować ponownie raz użytego produktu;
- Nie używać produktu do innych celów niż wskazane w ulotce;
- Dokładnie umyć ręce przed każdą aplikacją;
- Dokładnie oczyścić okolice pochwy przed każdą aplikacją;
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła;
- Nie używać produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu;
- Nie spożywać;
- Nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone;
- Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki produktu;
- Przerwać leczenie w przypadku wystąpienia nieprawidłowych reakcji skórnych;
- W przypadku długotrwałego użytkowania należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Brak znanych skutków przedawkowania. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jeden lub więcej składników.

Skład:

Woda, glikol propylenowy, gliceryna, TIAB, alkohol benzylowy, poliakrylan sodu, genisteina, mocznik, trehaloza, hialuronian sodu, kwas dehydrooctowy, glikol pentylenowy, seryna, algina, glikol kaprylowy, poliakrylan glicerylu, fosforan disodowy, pullulan, fosforan potasu.

Przechowywanie:

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania światła. Zawartość produktu wystawiona na działanie promieni słonecznych może przybrać lekko żółty odcień; nie wpływa to jednak na jego funkcjonalność i właściwości.

Zawartość opakowania:

-7 x 5 g jednorazowych aplikatorów dopochwowych

Stan informacji: Marzec 2020



Wytwórca:

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Mediolan, Włochy

Dystrybutor:

SOLINEA

Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska
Wyprodukowano w UE

LFTIA11500